

Hulp nodig? Neem contact met ons op
E-mail: support@betachek.com

BETACHEK® C50

Alles-in-één bloedglucosemeter

Snelstartgids




 **Tik hier voor videogidsen**



Inhoud

Onderdelenoverzicht

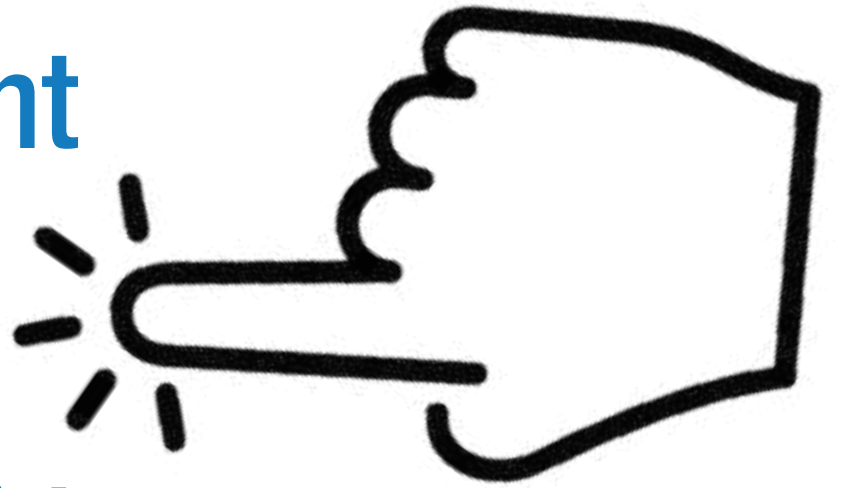

De meter voorbereiden

Hoe de tijd en datum in te stellen

Doe een test

Verbinding maken met de app

Reinig de meter E-4, E-5, E-9, E-12

Sleutel tot foutmeldingen

Onderdelenoverzicht



1. Schuifkap van de sensor
2. Scherm
3. Monster/instellingen knop
4. Geheugen terugroepen knop
5. Penetratiediepte wijzerplaat
6. Lancettenhouder
7. Lancetten
8. Lancet uitwerper



- 9. Testcassette
- 10. Duimwiel
- 11. Afdekkap van de batterij
- 12. Prikapparaat deksel
- 13. Penetratiediepte-indicator
- 14. Sensor

De meter voorbereiden

1

Verwijder het plastic van het scherm

Trek het plastic lipje uit het batterijcompartiment.



2

Schuif de sensorkap zo ver mogelijk naar links. Meter gaat aan.



3

Cassette plaatsen, afgerond uiteinde eerst en plat aandrukken. Sluit het sensordeksel.



4

Schuif het deksel van het prikapparaat open.



5

Installeer het lancet en draai de dop eraf.



6

Sluit het deksel van het prikapparaat en stel de gewenste penetratiediepte in.



Hoe de tijd en datum in te stellen

1

Houd de S-toets ingedrukt om het instellingenmenu te openen.



Video 1




Meter kan 'exp' weergeven (cassette verlopen) als de juiste datum niet is ingesteld.



2

Druk op M om het knipperende teken te wijzigen. Druk op S om op te slaan.

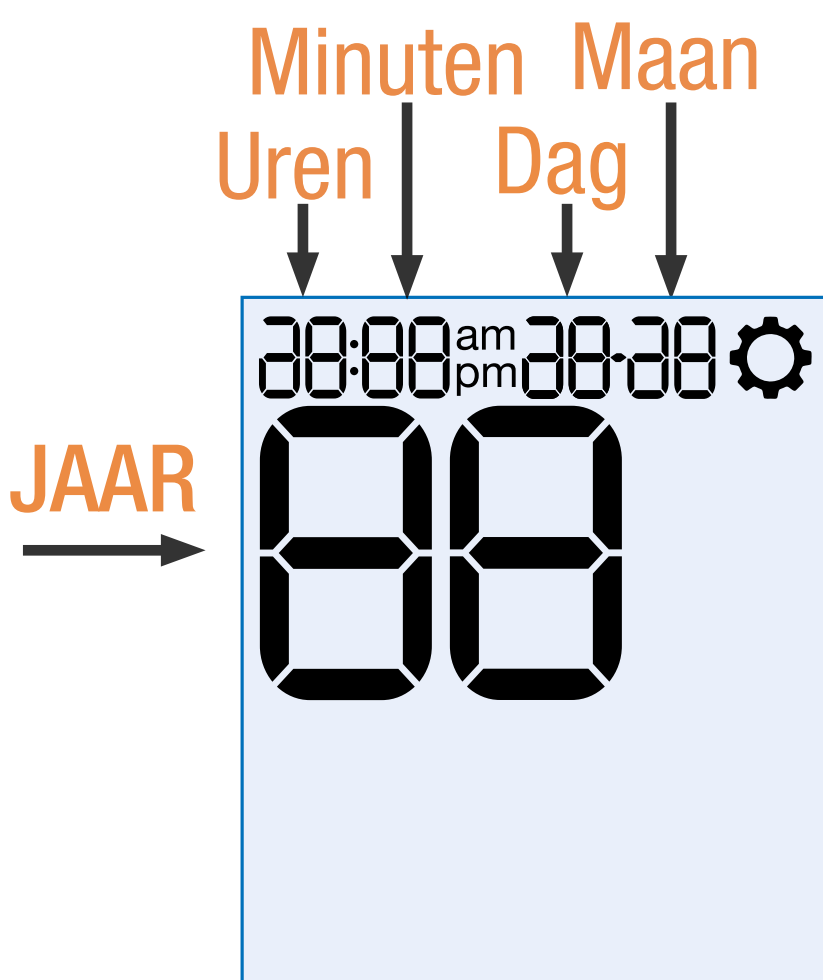

Gebruik de app (optioneel)

- 1 Download de app op je mobiele apparaat (er zijn er twee om uit te kiezen)

1. MedM Health App



Apple of Android toestellen- links naar iOS Gezondheid - mySugr



Med M App Guide

2. BETACHEK Diabetes App




Alleen Apple-apparaten



Video 4

- 2 Houd de toetsen S + M ingedrukt tot het koppelingssymbool verschijnt.

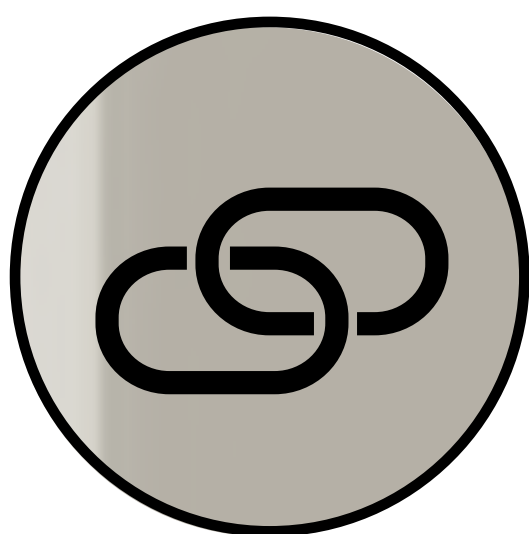

Op sommige modellen kan een ander symbool knippen

Open de app op je mobiele apparaat en volg de instructies.



Doe een test



Bekijk videogids 2

1

Was je handen in warm water



2

**Droog je
handen goed
af.**



3

Open het sensordeksel en wacht op het opwindsymbool:



4

Draai aan het duimwiel totdat een testzone in positie is en het scherm "OK" weergeeft.



5


Druk de prikapparaat stevig tegen de gekozen prikplaats en druk vervolgens op S*



Ja,
je kunt weer
prikken

*Om dit te herhalen, sluit en open je het sensordeksel om het prikapparaat op te laden.

6

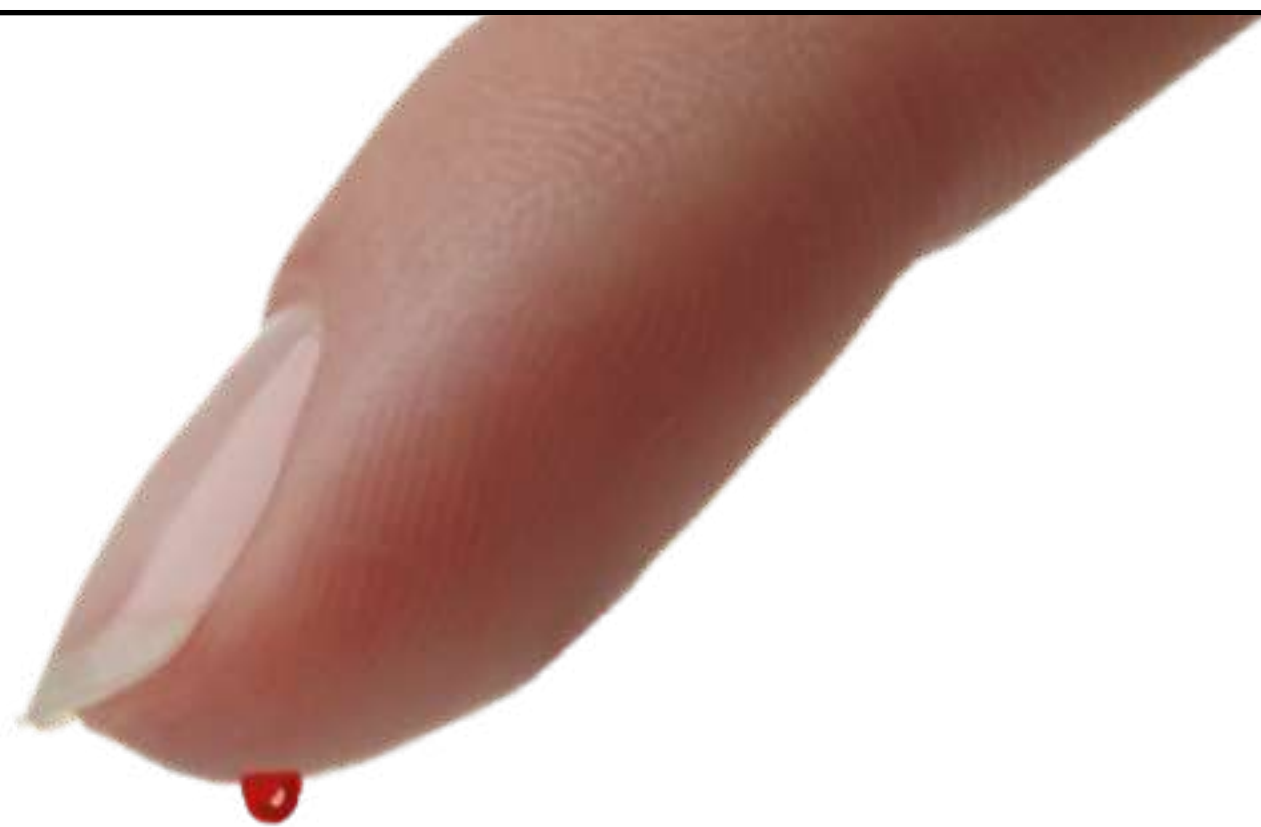

- Knijp voorzichtig een kleine ronde druppel bloed uit je hand.
- Houd de palm van je hand naar beneden gericht.
- **Onmiddellijk gebruiken.** Laat de druppel niet uitlopen of opdrogen.

7

**Wacht op het knipperende
bloeddruppelsymbool en breng dan
bloed aan.**



**Richt op
het rode
knipperlicht.**





Je kunt op de bloeddruppel drukken om deze te verspreiden.



Raak de testzone niet aan



Bedek het rood verlichte gebied met bloed, anders geeft de meter **E-7** weer of krijgt u een onnauwkeurig resultaat. 



Verspreid geen bloed van de rand van de tape naar de glucosemeter.



Zie: De Meter Reinigen.



Smeer geen kleine druppel uit over de testzone. Gebruik een grotere druppel.



8

Resultaten in ca. 5 seconden



9

Draai aan het duimwiel om de gebruikte test naar de afvalkamer te verplaatsen. Stop wanneer "OK" wordt weergegeven.



10 Sluit het sensordeksel. De meter wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Als u sluit het sensordeksel voordat u de gebruikte test naar de afvalkamer verplaatst, wordt **E-3** weergegeven.



Reinig de meter E-4, E-5, E-9, E-12

- 1** Verwijder de cassette: Duw op het gebogen greepgebied + til het andere uiteinde van de cassette eruit.



Maak de glucosemeter schoon als u bloed van de tape van de glucosemeter verspreidt of als u een van de bovenstaande foutmeldingen krijgt.




Cassette verwijderen

- 2** Reinig het sensorvenster met een vochtige wattenstaafje of tissue in de aangegeven richting.



Video 5

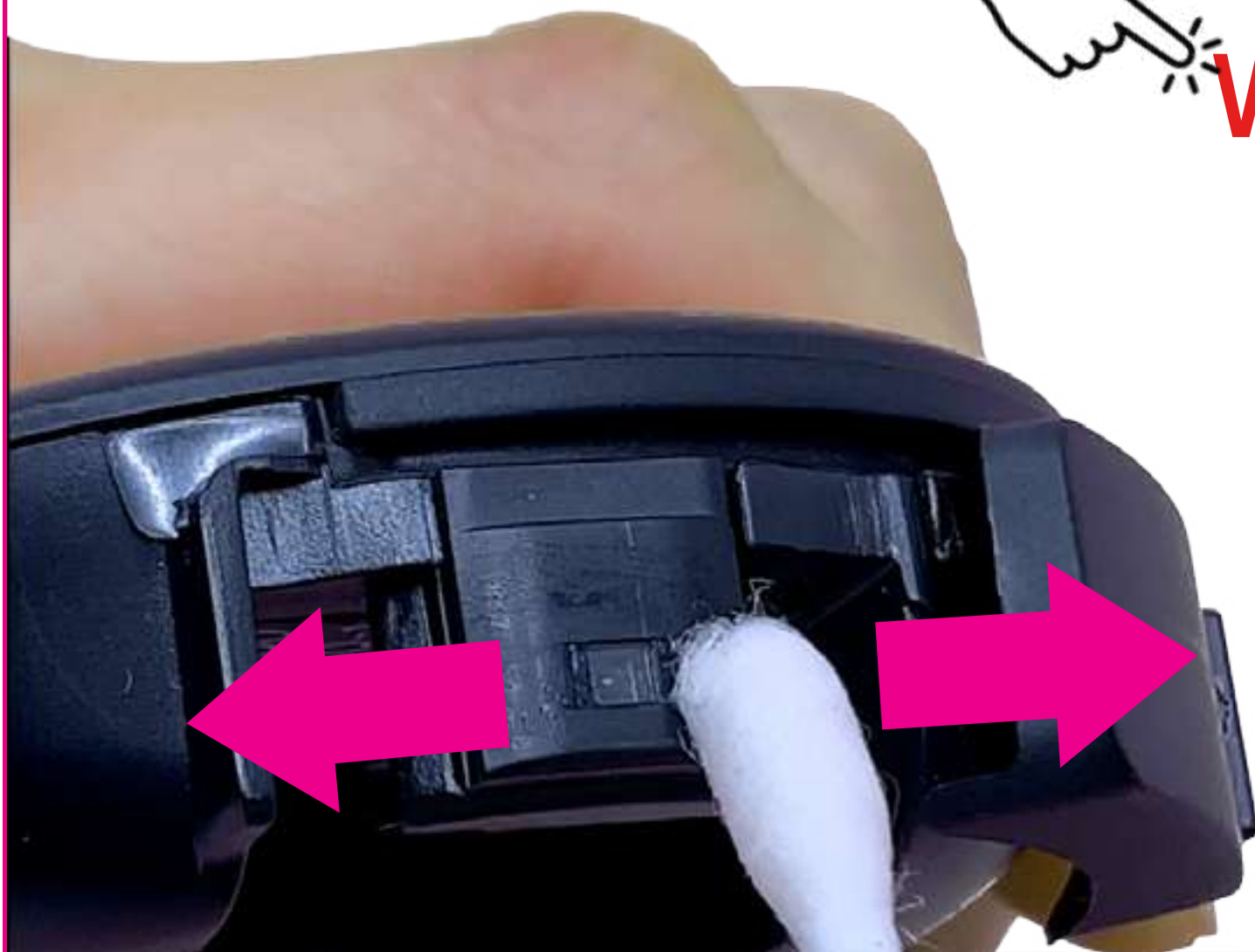

Sleutel tot foutmeldingen

	<p>Gebruikte test niet verplaatst naar afvalopslag.</p> <p>Open het sensordeksel en draai aan het duimwiel totdat “OK” op het display van de meter verschijnt.</p>
	<p>Te vroeg aanbrengen van bloed of vuil sensorvenster.</p> <p>Wacht op het bloeddruppelpictogram voordat je bloed aanbrengt of het sensorvenster schoonmaakt.</p>
	<p>Te veel direct zonlicht of een vies sensorraam.</p> <p>Ga naar een schaduwrijke plek of maak het sensorvenster schoon.</p>
	<p>Het duimwiel is te vaak gedraaid.</p> <p>Ga door met wikkelen totdat de meter “OK” zegt.</p>
	<p>Onvoldoende bloed of niet boven het rode knipperlicht geplaatst</p> <p>Gebruik een grotere druppel of druk op de druppel om deze te verspreiden.</p>
	<p>testzone defect of sensorvenster vuil.</p> <p>Reinig het sensorvenster en herhaal de test.</p>
	<p>Verlopen cassette of verkeerde datum</p> <p>Cassette is over de vervaldatum of langer dan 90 dagen geopend.</p> <p>Controleer of de in de glucosemeter ingestelde datum correct is.</p>



Ga naar de gebruikershandleiding

- De BETACHEK C50 meter en het prikapparaat zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Niet voor gebruik door meerdere patiënten.
- De BETACHEK C50 heeft een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie is niet van toepassing op onopzettelijke schade, normale slijtage of verkeerd gebruik van de meter. Om aanspraak te maken op uw garantie kunt u contact opnemen met: support@betachek.com
- Deze beknopte handleiding vervangt niet de gebruikershandleiding, die belangrijke aanvullende informatie bevat.

